

# **GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

## **CHECKLIST VESTIZIONE TUTA**

**1**

**Prima di iniziare la vestizione accertarsi di non indossare anelli, bracciali, orologi o altri monili**

**2**

**Disporre tutti i DPI su un piano di appoggio, verificare l'integrità delle confezioni e dei dispositivi**

**3**

**Igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica**

**4**

**Seduti su un panchetto o su una sedia, indossare i calzari**

**5**

**Igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica**

**7**

**Indossare il primo paio di guanti, preferibilmente lunghi**

**8**

**Indossare il facciale filtrante FFP3, regolare lo stringinaso e verificarne la tenuta**

**9**

**Prendere la tuta, aprire la zip portando il cursore fino al fermo inferiore**

**10**

**Seduti su un panchetto o su una sedia, indossare la tuta, dagli arti inferiori, avendo cura di non danneggiarla**

**11**

**Alzarsi in piedi e sollevare la tuta, posizionandola correttamente all'altezza del bacino**

**12**

**Sollevare la tuta fino a metà busto e infilare le braccia, una alla volta.**

**13**

**Posizionare correttamente la tuta, eliminando eventuali pieghe, posizionare il cappuccio e chiudere la zip e il sottogola**

**14**

**Posizionare lo scudo facciale e verificarne la stabilità**

**15**

**Indossare il secondo paio di guanti, assicurandosi che vadano a coprire i polsini della tuta**